

腕装着で感覚、感触をリアルに体験

<http://www.sensitiv.jp>

sensitiv[®] III

採血 静注 練習 キット

特許登録済・商標登録済

新人看護職員研修ガイドライン
看護技術の到達目標項目

- ・腕に付けて声掛けを練習
- ・実際の肌・血管に近い感触で学ぶ
- ・駆血帯の締め具合で怒張状態の感覚を学ぶ
- ・注射針の見える化で内出血を確認
- ・逆血で苦手な留置針の練習
- ・真空採血バックで連続採血が可能



1人トレーニングも

※模擬血液バックは本体に付属していません



※ 本品の静注とは点滴静注の手技を示しています

※ 手袋、注射器、注射針、駆血帯、模擬血液バック、真空採血バック、模擬皮下脂肪カバー(3mm、5mm)は本体に含まれません

模擬血管は一度に
3カ所セット

内出血の確認

注射痕が分かり難い

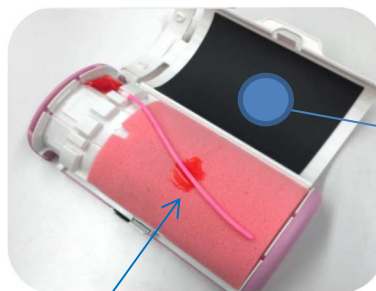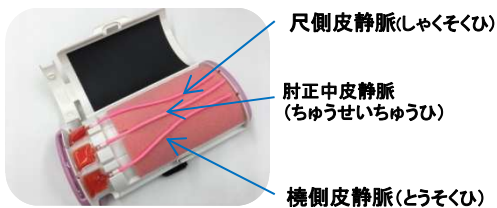



模擬皮膚を指で広げれば
針跡が確認できます



模擬皮下脂肪カバーは
簡単に交換

逆血の確認

真空採血バック

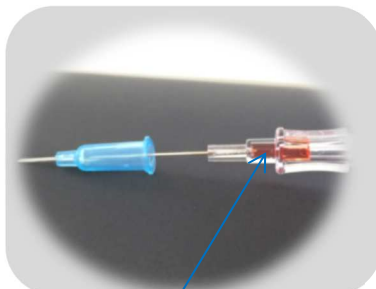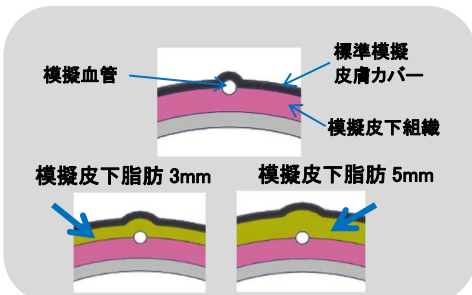

模擬血管内に針先が入ると
逆血します

真空採血管(約5cc)2本の
連続採血が可能です

※内出血等が発生すると十分な採血量を確保出来ないこともあります

□ 特徴

- 駆血帯は布・ゴム製に対応しています
- 模擬血液バックは1回毎の使い捨て準備、後始末の煩わしさがありません
- 模擬皮下組織、模擬皮膚カバー、模擬皮下脂肪カバー（3mm、5mm）は簡単に交換出来ます
- 真空採血バックをセットすると約 5cc 2本の連続採血が可能になります

※内出血等が発生すると十分な採血量を確保出来ないこともあります

□ 仕様

【本体】

JANコード	4573161310111
型式	KCC-B18-00:腕装着可能タイプ
外形寸法	W253mmxD119mmxH55mm
重量	約 252g

□ 交換部品・消耗品

- 部品の交換は交換部品を別途、お買い求めください
- 模擬血液バックなどの消耗品は適宜お買い求めください

	品名/型式/JANコード		品名/型式/JANコード
	sensitiv III®用模擬皮膚カバー		sensitiv III®用模擬皮下組織シート
	KCC-B18-030		KCC-B18-070
	JANコード: 4573161310128		JANコード: 4573161310159
	sensitiv III®用模擬皮膚カバー (皮下脂肪 3mm タイプ)		模擬皮膚カバーロック具
	KCC-B18-040		KCC-B18-110
	JANコード: 4573161310135		JANコード: 4573161310166
	sensitiv III®用模擬皮膚カバー (皮下脂肪 5mm タイプ)		腕固定ベルト
	KCC-B18-050		KCC-B18-120
	JANコード: 4573161310142		JANコード: 4573161310173
	模擬血液バック		真空採血バック
	KCC-A-15-01-05		KCC-B18-100
	JANコード: 4573161310043		JANコード: 4573161310180

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

開発元



＜製品に関するお問い合わせ＞

日立営業所 : (0294)53-3244
 東京支社 : (03)5802-7507
 名古屋営業所 : (052)778-6010
 神戸営業所 : (078)992-1113
 九州営業所 : (092)622-8605
 本社 : (078)992-1111